

Procedimiento de la prueba: siga las indicaciones que aparecen en pantalla.



1. ENCIENDA EL ProTime®

- Presione el botón 0.
- Observe la pantalla y siga las indicaciones que aparecen en ella.



2. INSERTE LA CUBETA DE LA PRUEBA

- El código de barras debe mirar hacia abajo.
- El ProTime calienta la cubeta.
- ESPERE** a la indicación antes de hacer la incisión en el dedo.




3. PREPARE EL DEDO

- Caliente las manos para estimular el flujo sanguíneo.
- Limpie el dedo.
- ESPERE** a la indicación antes de hacer la incisión en el dedo.




4. HAGA LA INCISIÓN EN EL DEDO

- Apriete el Tenderlett® Plus contra el lateral del dedo.
- Coloque el pulgar sobre el gatillo rojo, como se ve en la foto.
- Presione el gatillo rojo.

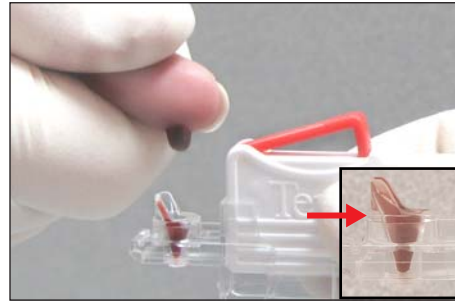


5. LLENE LA PEQUEÑA COPA HASTA LA LÍNEA QUE HAY EN ELLA

- Limpie la primera gota de sangre que salga; no la utilice para la prueba.
- Forme una GOTA GRANDE de sangre.
- Ponga en contacto la gota con la copa.
- LLENE** la copa hasta la línea indicada por la flecha de la foto.

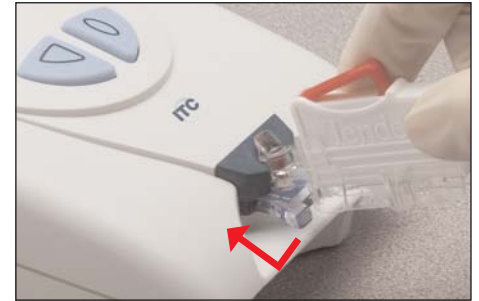

6. ACOPLE EL TENDERLETT PLUS AL PROTÍME

- Sujete el Tenderlett Plus de manera que quede inclinado.
- Inserte el extremo de la copa en la ranura.
- Presione hacia abajo hasta que el Tenderlett Plus quede fijado.

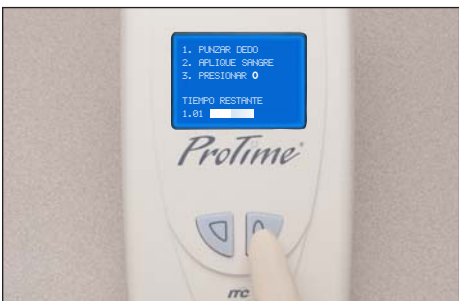


7. PRESIONE EL BOTÓN 0

- Presione el botón 0.
- SIGA** las indicaciones que aparecen en pantalla.



8. EXTRAIGA EL TENDERLETT PLUS

- Cuando se le **INDIQUE** en pantalla, extraiga el Tenderlett Plus.
- El ProTime le da seis segundos para extraer el Tenderlett Plus.

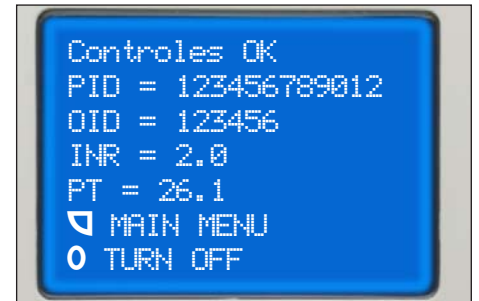

9. LEA LOS RESULTADOS

- Los resultados permanecen en pantalla durante cinco minutos.

ProTime and Tenderlett are registered trademarks of ITC.



8 Olsen Avenue • Edison, NJ 08820 USA
tel: 732.548.5700 • fax: 732.248.1928
www.itcmed.com

a subsidiary of Thoratec Corporation

**Servicio de asistencia
técnica de ITC**

teléfono: 1-800-631-5945

fax: 1-732-548-9824

correo electrónico:

techsupport@itcmed.com